

CHLORASEPT 2%CHG MD

Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό διάλυμα για γρήγορη απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων

CE 0120

Τί είναι το CHLORASEPT 2% CHG MD

Το CHLORASEPT 2% CHG MD είναι ένα νέο προϊόν (έτοιμο προς χρήση), μοναδικό στην Ελλάδα για απολύμανση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με βάση την ισοπροπυλική αλκοόλη και κλωρεξιδίνη 2%

Είναι σύμφωνο με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών (π.χ. CDC, Guidelines for the prevention of intravascular Catheter - Related infections, 2011, κλπ) για την απολύμανση των ενδοαγγειακών καθετήρων.

Η συνδυαστική δράση και η υψηλή αποτελεσματικότητα της ισοπροπυλικής αλκοόλης και της κλωρεξιδίνης προσδίδουν στο CHLORASEPT 2% CHG MD ευρύ φάσμα (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, φυματιοκτόνο και ιοκτόνο) και μεγάλη υπολειμματική δράση συμβάλλοντας στην μείωση και πρόληψη των λοιμώξεων.

Το CHLORASEPT 2% CHG MD είναι ιδανικό για την απολύμανση κεντρικών καθετήρων (π.χ. μονού ή πολλών αυλών, Swan-Ganz κλπ), περιφερειακών καθετήρων, εμφυτεύσιμων καθετήρων (π.χ. Hickman, Broviac, Groshong, Quinton), ολικά εμφυτεύσιμων ενδοαγγειακών συσκευών (ports), σημείων σύνδεσης καθετήρων και συσκευών έγχυσης (Hub), συστημάτων παρακολούθησης πίεσης (σε σύνδεση με τους αρτηριακούς καθετήρες), στηθοσκοπίων και οποιουδήποτε άλλου ιατροτεχνολογικού προϊόντος είναι ανθεκτικό στην αλκοόλη.

Χημική σύσταση

Chlorhexidin digluconate (CAS 18472-51-0)	2.0% m/v
Propan-2-ol (CAS 67-63-0)	70.0% v/v
Purified water	έως τα 100gr
Όψη	Υγρό διαφανές
pH	7.2 - 7.4
Πυκνότητα	0.86 g/cm ³

Φάσμα δράσης

Το CHLORASEPT 2% CHG MD έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης: Βακτηριοκτόνο (incl. MRSA), Φυματιοκτόνο (incl. TBC), Μυκητοκτόνο και ιοκτόνο (enveloped viruses, HIV/HBV/HCV).

Φάσμα Δράσης	Μέθοδος	Χρόνος
Bactericidal (<i>Paeruginosa, S.aureus, E.hirae</i>)	EN 13727 EN 14561	3 min
Bactericidal (MRSA)	EN 1040	1 min
Fungicidal (<i>Calbicans, A.niger</i>)	EN 13624 EN 14562	3 min
Mycobactericidal / tuberculocidal (<i>M.terrae, M.avium</i>)	EN 14348	3 min
Virucidal (<i>enveloped viruses, HIV/HBV/HCV</i>)	EN 14476	3 min

Ταξινόμηση

Το CHLORASEPT 2% CHG MD είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα χημικά Απολυμαντικά Directive 93/42/CEE και έχει καταχωρηθεί ως Ιατροτεχνολογικό βοήθημα - Class IIb

Τρόπος χρήσης

Το CHLORASEPT 2% CHG MD, εφαρμόζεται αδιάλυτο. Η απολύμανση γίνεται με ψεκασμό στις επιφάνειες των καθετήρων, στηθοσκοπίων, Ιατροτεχνολογικών συσκευών και Ιατροτεχνολογικών εργαλείων. Χρόνος δράσης 1-3 λεπτά.

Αποθήκευση

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αποθήκευση σε κλειστά δοχεία, στην αρχική συσκευασία, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από πηγές ανάφλεξης ή ανοιχτή φλόγα και <35°C. Μην το εκθέτετε απευθείας στο ηλιακό φως.

Προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξε το δοχείο ή την ετικέτα.

Συσκευασία - Μορφές

Το CHLORASEPT 2% CHG MD κυκλοφορεί σε: Sprayer bottle 250 ml.

Χρόνος Ζωής: 3 χρόνια

Εισαγωγή - Διάθεση για την Ελλάδα:
FBServices Μ.ΕΠΕ.

Λ. Μαραθώνος 19, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, Αθήνα
Τηλ. 210 2310622
E-mail: info@fbservices.gr

fbservices

www.fbservices.gr

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ