

ENZYDIP - 3

Πυκνό ενζυματικό διάλυμα για τον καθαρισμό των ιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων πριν την απολύμανση και την αποστείρωση



Εφαρμογή

Το **EnzyDip-3** σχεδιάστηκε ειδικά για τον χειρωνακτικό καθαρισμό των ιατρικών οργάνων, χειρουργικών και οδοντιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων προ της απολύμανσης ή της αποστείρωσης.

Ιδιότητες

Λόγω του συνδυασμού των επιφανειοδραστικών ουσιών και των ενζύμων (amylase, protease and lipase), το **EnzyDip-3** αφαιρεί με αποτελεσματικότητα αίμα, υπολείμματα ιστών, πρωτεΐνες, υπολείμματα βλεννογόνου, περιπτώματα και άλλες ακαθαρσίες από εργαλεία και εξοπλισμό των ιατρικών οργάνων και συσκευών συμπεριλαμβανομένων των εύκαμπτων και άκαμπτων ενδοσκοπίων και οδοντοιατρικών εργαλείων.

Το **EnzyDip-3** έχει μια πολύ καλή καθαριστική ιδιότητα, είναι χαμηλού αφρισμού, εύκολο στο ξέπλυμα και συμβατό με διάφορα υλικά όπως πολυβινυλοχλωρίδιο, καουτσούκ, πλαστικό, ανοξείδωτο χάλυβα, κράματα αλουμινίου, μη σιδηρούχων μετάλλων και κεραμικών.

Οδηγίες Χρήσης

Το EnzyDip-3 είναι πυκνό διάλυμα και πρέπει να αραιώνεται με νερό. Ανάλογα με τον τύπο και την ποσότητα ρύπου, το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες αραιώσεις. Η συνιστώμενη αραιώση είναι μεταξύ 1:200 και 1:100 με νερό βρύσης. Τα εργαλεία πρέπει να παραμένουν εμβαπτισμένα για 5'-10' στο δοχείο εμβάπτισης του διαλύματος και σε θερμοκρασία δωματίου. Η προετοιμασία του διαλύματος με ζεστό νερό περίπου 40°C μειώνει τον χρόνο καθαρισμού. Ο καθαρισμός σε λουτρό υπερήχων μειώνει δραστικά το χρόνο καθαρισμού επίσης (1-3 λεπτά). Σωλήνες, εύκαμπτοι σωλήνες και εσωτερικά μέρη πρέπει να καθαρίζονται με προσοχή. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να δοθεί ώστε να μην αφήνετε κενά μέρη και κοιλότητες αέρα. Ξεραμένα υπολείμματα μπορούν να απομακρυνθούν με τη βοήθεια βούρτσας ή περαιτέρω χρόνου δράσης. Μετά τον καθαρισμό, τα εργαλεία θα πρέπει να ξεπλυθούν με άφθονο νερό βρύσης.

Ταξινόμηση

Το EnzyDip-3 καταχωρείται ως medical device - Class I.

Σύνθεση

Κάθε 100 g EnzyDip-3 περιέχουν
Ενεργά συστατικά: Επιφανειοδραστικά < 10 g
Ένζυμα (Lipase, Amylase, Protease) < 20 g

Πρόσθετα: Συντηρητικά, χηλικοί παράγοντες, αντιδιαβρωτικοί παράγοντες

Εμφάνιση: Διαυγές, ελαφρά καφέ υγρό
pH: 7.4 - 7.9

Συνθήκες Αποθήκευσης

Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Να φυλάσσεται κλειστό, στην πρωτότυπη συσκευασία, σε ξηρό και αεριζόμενο περιβάλλον, μακριά από την απ'ευθείας έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C.

Προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Επεξεργασία των αποβλήτων και των συσκευασιών - σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Μην αφήσετε το συμπύκνωμα στο περιβάλλον - για τη διάθεση των αποβλήτων, υπολειμμάτων και των κενών συσκευασιών δείτε ειδικές οδηγίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Συσκευασία

Δοχείο 1Lt & Κάνιστρο των 5L
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

Εισαγωγή - Διάρθρωση για την Ελλάδα:
FBServices Μ.ΕΠΕ.

Λ. Μαραθώνος 19, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, Αθήνα
Τηλ. 210 2310622
E-mail: info@fbservices.gr