

QUARTYSEPT SPRAY

Έτοιμο προς χρήση

Αλκοολούχο απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Περιοχές χρήσης

Το **Quartysept** προορίζεται για την γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η μορφή Spray του διαλύματος, επιτρέπει την εύκολη απολύμανση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων και μικρών επιφανειών, εργαλείων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Οι απολυμασμένες επιφάνειες καθώς και τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το χρόνο δράσης χωρίς ξέπλυμα με νερό.

Ιδιότητες

Το Quartysept είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλδεΐδες, φαινόλες. Είναι ένας ισορροπημένος συνεργιστικός συνδυασμός αλκοολών και τεταρτοταγών ενώσεων αμμωνίου που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Το παρασκεύασμα δεν βλάπτει τις επιφάνειες (ανθεκτικές στην αλκοόλη) και είναι συμβατό με διαφορετικά υλικά. Το προϊόν δεν έχει καμία επίδραση ερεθισμού ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρήση.

Σύνθεση

Κάθε 100g Quartysept περιέχουν:

Ενεργά Συστατικά:

- Propan-2-ol 20 g
- Ethanol 10 g
- Benzalkonium chloride 0.20 g

Πρόσθετα: Αντιδιαβρωτικοί παράγοντες, Απιονισμένο νερό, Άρωμα

Εμφάνιση: Διαυγές υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα

pH: 5.5 – 7.5 (20°C)

Φάσμα Δράσης

Βακτηριοκτόνο (συμπ. MRSA) – Μυκοβακτηριοκτόνο – Μυκητοκτόνο – Ιοκτόνο.

Δραστηριότητα	Μέθοδος	Χρόνος
Bactericidal (<i>Paeruginosa, S.aureus, E.hirae</i>)	EN 13727	1 min
Fungicidal (<i>Calbicans, A.niger</i>)	EN 13624	1 min
Mycobactericidal (<i>M.terrae</i>)	EN 14348	5 min
Virucidal (<i>HIV, HBV, HCV, Rotavirus, Adenovirus, Papovavirus, Influenza</i>)	EN 14476	1 min

Ταξινόμηση

Το **Quartysept** είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα χημικά Απολυμαντικά Directive 93/42/CEE και έχει καταχωρηθεί ως Ιατροτεχνολογικό βοήθημα - Class IIb.

Τρόπος Χρήσης

Το Quartysept, εφαρμόζεται αδιάλυτο. Η απολύμανση γίνεται με ψεκάσμο στις επιφάνειες, την επιφάνεια των εργαλείων, Ιατροτεχνολογικών συσκευών και Ιατροτεχνολογικών εργαλείων, ψεκάζοντας τις από απόσταση περίπου 30 εκατοστών. Χρόνος δράσης 1-5 λεπτά. Συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών πριν την απολύμανση.

Όταν εφαρμόζεται για απολύμανση επιφανειών, ιατρικών συσκευών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πρέπει να γίνεται μακριά από πηγές ανάφλεξης!

Μετά το χρόνο δράσης, οι απολυμασμένες επιφάνειες και τα αντικείμενα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα χωρίς να τις ξεπλύνετε.

Συνθήκες Αποθήκευσης

Κρατήστε μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται πάντα στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε καλά αεριζόμενη περιοχή, μακριά από πηγές ανάφλεξης, συσκευές με ανοιχτή φλόγα σε <30° C. Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας στον ήλιο.

Προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα

Επεξεργασία των αποβλήτων και των συσκευασιών - σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Μην αφήσετε το συμπύκνωμα στο περιβάλλον - για τη διάθεση των αποβλήτων, υπολειμμάτων και των κενών συσκευασιών δείτε ειδικές οδηγίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Συσκευασία

Πλαστική φιάλη 1000 ml με Spray
Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια

Εισαγωγή - Διάθεση για την Ελλάδα:

FBServices Μ.ΕΠΕ.

Λ. Μαραθώνος 19, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, Αθήνα

Τηλ. 210 2310622

E-mail: info@fbservices.gr