

# SEPTOQUAT AM (MD) RFU

## Έτοιμο προς χρήση

**Ελεύθερο αλκοολών και αλδεϋδών καθαριστικό απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και εξοπλισμού.**

### Περιοχές χρήσης

Το **Septoquat AM (MD) RFU** προορίζεται για τον καθαρισμό και την γρήγορη απολύμανση ευαίσθητων και μη ανθεκτικών στην αλκοόλη, επιφανειών ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων και εξοπλισμού όπως ψηφιακές οθόνες, τροχήλατα, θερμοκοιτίδες, ασθενοφόρα, συσκευές υπερήχων, λάμπες χειρουργείων κλπ.

Η μορφή Spray του διαλύματος, επιτρέπει την εύκολη απολύμανση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι απολυμασμένες επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το χρόνο δράσης.

### Ιδιότητες

Το **Septoquat AM (MD) RFU** είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλκοόλες, αλδεϋδες, και φαινόλες. Είναι ένας ισορροπημένος συνεργικός συνδυασμός αμινών και τεταρτοταγών αμμωνιακών αλάτων που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Το προϊόν δεν βλάπτει τις επιφάνειες και είναι συμβατό με όλα τα υλικά.

### Σύνθεση

Κάθε 100 g SEPTOQUAT AM ( MD) RFU περιέχουν:

#### Ενεργά Συστατικά:

- Benzalkonium chloride 0,40 g
- Didecyl dimethyl ammonium chloride 0,20g
- N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,24g

**Πρόσθετα:** Αντιδιαβρωτικοί παράγοντες, Απιονισμένο νερό.

**Εμφάνιση:** Διαυγές υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα

pH: 9,4 - 9,6

### Φάσμα Δράσης

Βακτηριοκτόνο (συμπ. MRSA) - Μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ.Tbc) - Μυκητοκτόνο, Ιοκτόνο.

Δραστηκότητα	Μέθοδος	Χρόνος
Bactericidal ( <i>Paeruginosa, MRSA, S.aureus, E.hirae</i> )	EN 13727	5 min
Fungicidal ( <i>Calbicans, A.niger</i> )	EN 13624	5 min
Bactericidal and Fungicidal	EN 14561	5 min
Fungicidal ( <i>Calbicans, A.niger</i> )	EN 14562	5 min
Mycobactericidal/ tuberculocidal	EN 14348	30 min
Virucidal ( <i>HBV/HCV/HIV/Adeno/Vaccinia</i> )	EN 14476	5 min

### Ταξινόμηση

Το **Septoquat AM (MD) RFU** είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα χημικά Απολυμαντικά Directive 93/42/CEE και έχει καταχωρηθεί ως Ιατροτεχνολογικό βοήθημα - Class IIb.

### Τρόπος Χρήσης

Το **Septoquat AM (MD) RFU**, εφαρμόζεται αδιάλυτο. Η απολύμανση γίνεται με ψεκασμό στις επιφάνειες των Ιατροτεχνολογικών συσκευών και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ψεκάζοντας από απόσταση περίπου 30 εκατοστών. Χρόνος δράσης 5 λεπτά. Συνίσταται ο καθαρισμός των επιφανειών πριν την απολύμανση.

Μετά το χρόνο δράσης, οι απολυμασμένες επιφάνειες και τα αντικείμενα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα.

### Συνθήκες Αποθήκευσης

Κρατήστε μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται πάντα στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε καλά αεριζόμενη περιοχή, <30° C. Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας στον ήλιο.

### Προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

### Επεξεργασία των αποβλήτων και των συσκευασιών - σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Μην αφήσετε το συμπύκνωμα στο περιβάλλον - για τη διάθεση των αποβλήτων, υπολειμμάτων και των κενών συσκευασιών δείτε ειδικές οδηγίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

### Συσκευασία

Πλαστική φιάλη 1000 ml με Spray

**Διάρκεια ζωής:** 3 χρόνια

Εισαγωγή - Διάθεση για την Ελλάδα:  
**FBServices Μ.ΕΠΕ.**

Λ. Μαραθώνος 19, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, Αθήνα  
Τηλ. 210 2310622  
E-mail: info@fbservices.gr