

# ZHIVASEPT RAPID MD

**Έτοιμο προς χρήση, Αλκοολούχο απολυμαντικό για τη γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων και Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.**

CE 0120

## Εφαρμογή

Το **Zhivasept Rapid MD** προορίζεται για την γρήγορη απολύμανση επιφανειών, επεμβατικών και μη επεμβατικών εργαλείων καθώς και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Η μορφή Spray του διαλύματος, επιτρέπει την εύκολη απολύμανση ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων και μικρών επιφανειών, εργαλείων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι απολυμασμένες επιφάνειες καθώς και τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως μετά το χρόνο δράσης χωρίς ξέπλυμα με νερό.

## Ιδιότητες

Το **Zhivasept Rapid MD** είναι έτοιμο προς χρήση, ελεύθερο από αλδεύδες, φαινόλες και τεταρτοταγείς αμμωνιακές ενώσεις. Είναι ένας ισορροπημένος συνεργιστικός συνδυασμός αλκοολών που επιτυγχάνει γρήγορη και ασφαλή απολύμανση. Τα ενεργά του συστατικά είναι βιοδιασπώμενα. Το παρασκεύασμα δεν βλάπτει τις επιφάνειες ανθεκτικές στην αλκοόλη και είναι συμβατό με διαφορετικά υλικά. Το προϊόν δεν έχει καμία επίδραση ερεθισμού ακόμα και μετά από επανειλημμένη χρήση.

## Οδηγίες Χρήσης

Το **Zhivasept Rapid MD**, εφαρμόζεται αδιάλυτο. Η απολύμανση γίνεται με ψεκασμό στις επιφάνειες, την επιφάνεια των εργαλείων, Ιατροτεχνολογικών συσκευών και Ιατροτεχνολογικών εργαλείων, ψεκάζοντας τες από απόσταση περίπου 30 εκατοστών. Χρόνος δράσης 5 λεπτά. Συνιστάται ο καθαρισμός των επιφανειών πριν την απολύμανση.

**Όταν εφαρμόζεται για απολύμανση επιφανειών, ιατρικών συσκευών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, πρέπει να γίνεται μακριά από πηγές ανάφλεξης!**

Μετά το χρόνο δράσης, οι απολυμασμένες επιφάνειες και τα αντικείμενα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα χωρίς να τις ξεπλύνετε.

## Φάσμα δράσης

Βακτηριοκτόνο (συμπ. MRSA) – Μυκοβακτηριοκτόνο (συμπ..Tbc) – Μυκητοκτόνο - Ιοκτόνο.

Φάσμα Δράσης	Μέθοδος	Χρόνος
Bactericidal ( <i>Paeruginosa, Saureus, E.hirae</i> )	EN 14561: 2006	5 min
Fungicidal ( <i>Calbicans</i> )	EN 14562: 2006	5 min
Mycobactericidal ( <i>M.terrae, M.avium</i> )	EN 14348: 2005	1 min
Virucidal ( <i>Poliovirus 1, Adenovirus 5</i> )	EN 14476 : 2013	5 min

## Σύνθεση

Κάθε 100g ZHIVASEPT RAPID MD περιέχουν:

**Ενεργά συστατικά:**

- Propan-1-ol 45g
- Propan-2-ol 30g

**Πρόσθετα:** Αντιδιαβρωτικοί παράγοντες, Απιονισμένο νερό, Άρωμα

**Εμφάνιση:** Διαυγές υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα.

pH: 5.5 – 7.0

## Ταξινόμηση

Το **Zhivasept Rapid MD** είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα χημικά Απολυμαντικά Directive 93/42/CEE και έχει καταχωρηθεί ως Ιατροτεχνολογικό βοήθημα - Class IIb.

## Συνθήκες Αποθήκευσης

Κρατήστε μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται πάντα στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε καλά αεριζόμενη περιοχή, μακριά από πηγές ανάφλεξης, συσκευές με ανοιχτή φλόγα σε <30°C. Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας στον ήλιο.

## Προφυλάξεις

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλείτε εμετό, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

## Επεξεργασία των αποβλήτων και των συσκευασιών - σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Μην αφήσετε το συμπύκνωμα στο περιβάλλον - για τη διάθεση των αποβλήτων, υπολειμμάτων και των κενών συσκευασιών δείτε ειδικές οδηγίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

## Συσκευασία

Πλαστική φιάλη 1L με Spray.

**Διάρκεια ζωής:** 3 χρόνια

Εισαγωγή – Διάθεση για την Ελλάδα:  
FBServices Μ.ΕΠΕ.

Λ. Μαραθώνος 19, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας Αττικής, Αθήνα  
Τηλ. 210 2310622  
E-mail: info@fbservices.gr