

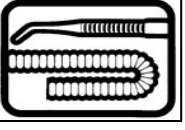
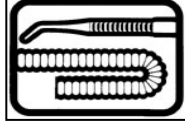
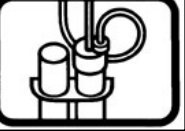



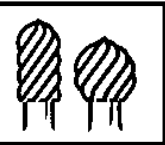


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

### ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΡΟΪΟΝ -ΤΡΟΠΟΣ	ΑΡΑΙΩΣΗ -ΧΡΟΝΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 <p>Υγιεινή Αντισηψία χεριών</p>	<p><b>BAKTI RUB</b> - επάλειψη με τρίψιμο -</p> <p><b>BAKTI GEL</b> - επάλειψη με τρίψιμο -</p>	Έτοιμο προς χρήση 30''	Μετά την φροντίδα και πριν την εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων	Πάρτε μέσω δοσιμετρικής αντλίας 3ml (2 φορές X 1,5ml) και τρίψτε τα χέρια σας.
 <p>Πλύσιμο χεριών</p>	<p><b>BAKTI PREMIUM</b> (Υγρός αντισάπων) - πλύσιμο -</p>	Έτοιμο προς χρήση	Μόνο σε περίπτωση εμφανών ρύπων σε σύνδεση με υγιεινή αντισηψία. Μετά την τουαλέτα. Κατά περίπτωση.	Τοποθετήστε το <b>Bakti Soap Premium</b> στα υγρά χέρια και αφήστε να αφρίσει ομοιόμορφα. Ξεπλύνετε καλά, σκουπίστε με χειροπετσέτα μιας χρήσεως.
 <p>Απολύμανση Εργαλείων συμπεριλαμβανομένων και των σωλήνων</p>	<p><b>SEPTOQUAT AM MD</b> - εμβάπτιση -</p> <p><b>GLUTASEPT S</b> - ετοιμο προς χρήση -</p>	3% 15' 15'	Μετά την χρήση (των εργαλείων, σωλήνων)	Εργαλεία και σωλήνες τοποθετούνται στο διάλυμα ώστε να καλύπτονται πλήρως. Να απομακρύνεται ο παγιδευμένος αέρας από τις κοιλότητες. Μετά τον χρόνο δράσης ξεπλύνετε καλά, στεγνώστε και προωθήστε τα αντικείμενα στον κλίβανο
 <p>Καθαρισμός Εργαλείων συμπεριλαμβανομένων και των σωλήνων</p>	<p><b>ENZYDIP 3</b> - εμβάπτιση -</p>	0,3% 10'	Μετά την χρήση (των εργαλείων, σωλήνων)	Εργαλεία και σωλήνες τοποθετούνται στο διάλυμα ώστε να καλύπτονται πλήρως. Να απομακρύνεται ο παγιδευμένος αέρας από τις κοιλότητες. Μετά τον χρόνο δράσης ξεπλύνετε καλά, στεγνώστε και προωθήστε τα αντικείμενα στον κλίβανο
 <p>Συσκευές αναρρόφησης</p>	<p><b>BECHT SUCTION PLUS</b></p>	2% 15'	Αμέσως μετά τη χρήση.	Αδειάστε το δοχείο, τοποθετήστε στο διάλυμα ώστε να καλύπτεται πλήρως χωρίς παρουσία φυσαλίδων. Τηρήστε τον χρόνο δράσης. Ξεπλύνετε καλά με τρεχούμενο νερό.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

### ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΠΡΟΪΟΝ -ΤΡΟΠΟΣ	ΑΡΑΙΩΣΗ -ΧΡΟΝΟΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
 <p>Οδοντιατρική καρέκλα</p>	<p><b>QUARTYSEPT</b> - ψεκάστε / σκουπίστε</p> <p><b>SEPTOQUAT AM</b> - σκουπίστε -</p>	<p>Έτοιμο προς χρήση 1´</p> <p>5% 5´</p>	<p>Μετά την αλλαγή ασθενών. Και κάθε 14 ημέρες.</p>	<p>Ετοιμάστε το διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες.Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα εμποτισμένο σε απολυμαντικό καθαρό πανί. Καλύψτε ομοιόμορφα την επιφάνεια. Μη στεγνώσετε την επιφάνεια</p>
 <p>Περιστροφικά Εργαλεία</p>	<p><b>ZHIVZHEX BURBATH</b></p>	<p>Έτοιμο προς χρήση 5´</p>	<p>Αμέσως μετά τη χρήση.</p>	<p>Εμβαπτίστε τα περιστροφικά αντικείμενα (φρέζες κλπ) για 5 λεπτά. Στην συνέχεια ξεπλύνετε και επαναχρησιμοποιείστε τα</p>
 <p>Τροχήλατο</p>	<p><b>QUARTYSEPT</b> - ψεκάστε / σκουπίστε</p> <p><b>SEPTOQUAT AM</b> - σκουπίστε -</p>	<p>Έτοιμο προς χρήση 1´</p> <p>5% 5´</p>	<p>Στο τέλος της ημερήσιας εργασίας</p>	<p>Ετοιμάστε το διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες. Αδειάστε το καρότσι και σκουπίστε εσωτερικά με ένα εμποτισμένο σε απολυμαντικό πανί. Οι ρόδες πρέπει να απολυμαίνονται μία φορά εβδομαδιαίως.</p>
 <p>Επιφάνειες στο χώρο εργασίας - Έπιπλα</p>	<p><b>SEPTOQUAT AM</b> - σκουπίστε -</p>	<p>1% 1h</p>	<p>Πολλές φορές ημερησίως</p>	<p>Ετοιμάστε το διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες.Σκουπίστε τις επιφάνειες με ένα εμποτισμένο σε απολυμαντικό καθαρό πανί ή σφουγγαρίστρα. Καλύψτε ομοιόμορφα την επιφάνεια.Μη στεγνώσετε την επιφάνεια.</p>