

# ZHIVAHEX MD

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

## Εφαρμογή

Το Zhivahex MD είναι έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό διάλυμα για ταχεία απολύμανση επεμβατικών και μη επεμβατικών ιατρικών και οδοντιατρικών εργαλείων, ιατροτεχνολογικών συσκευών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού. Είναι κατάλληλο και για λουτρό υπερήχων.

## Ιδιότητες

Το Zhivahex MD είναι διάλυμα ελεύθερο αλδεϊδών, με αλκοόλη και χλωρεξιδίνη. Περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες και είναι συμβατό με όλα τα υλικά κατασκευής των ιατρικών και οδοντιατρικών εργαλείων. Είναι εύκολο στη χρήση του.

Εμφάνιση Διαυγές έγχρωμο υγρό διάλυμα με ελαφρά ευχάριστο άρωμα  
pH 5.0 – 7.0

## Οδηγίες Εφαρμογής

Εμβαπτίστε τις φρέζες, τα τρυπάνια και τα άλλα ιατρικά και οδοντιατρικά εργαλεία στο Zhivahex MD αμέσως μετά τη χρήση (έτσι ώστε να μην στεγνώσει η επιφάνειά τους). Αφήστε το απολυμαντικό να δράσει για 5 λεπτά. Βγάλτε τα από το διάλυμα, αφήστε να στεγνώσουν και επαναχρησιμοποιήστε τα.

Εάν είναι απαραίτητο, τρίψτε με σκληρή βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα

Η χρήση λουτρού υπερήχων θα βελτιώσει τα αποτελέσματα καθαρισμού.

Εάν είναι απαραίτητο να αποστειρώσετε τα μικροεργαλεία μετά το Zhivahex MD, ξεπλύνετε με νερό και στεγνώστε τα προσεκτικά. Για καλύτερα αποτελέσματα, το διάλυμα θα πρέπει να αλλάζει καθημερινά.

## Φάσμα δράσης:

Βακτηριοκτόνο, Φυματιοκτόνο (incl. TBC), Μυκητοκτόνο και Ιοκτόνο

Φάσμα Δράσης	Μέθοδος	Χρόνος Δράσης
Bactericidal	EN 13727:2012	5 min
( <i>P.aeruginosa</i> , <i>S.aureus</i> , <i>E.hirae</i> )	EN 14561:2006	
Fungicidal	EN 13624:2013	5 min
( <i>C.albicans</i> , <i>A.niger</i> )	EN 14562:2006	
Mycobactericidal/ tuberculocidal	EN 14348:2005	5 min
( <i>M.terrae</i> , <i>M.avium</i> )		
Virucidal	EN 14476:2013	5 min
( <i>Adeno</i> , <i>Polio</i> , <i>M.norovirus</i> )		

FBServices M.ΕΠΕ,  
Ραβινέ 11 -13. 115 21, Αθήνα  
Τηλ. Κέντρο: +30 216 800 1254, email: info@fbservices.gr



## Ταξινόμηση:

Το Zhivahex MD είναι συμμορφούμενο με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MDR 2017/745, Καν 16, ως Ιατροτεχνολογικό εξάρτημα - Class IIb

## Σύνθεση

Τα 100 g Zhivahex MD περιέχουν:

### Δραστικά συστατικά:

0.5 g Chlorhexidin digluconate (CAS 18472-51-0)

60.0 g Propan- 2ol (CAS 67-63-0)

### Μη δραστικά συστατικά:

Μη ιονικά τασιενεργά, χρώμα.

## Συνθήκες αποθήκευσης:

Κρατήστε μακριά από παιδιά. Αποθηκεύεται πάντα στην αρχική κλειστή συσκευασία και σε καλά αεριζόμενη περιοχή, <35° C. Μην εκθέτετε το προϊόν απευθείας στον ήλιο..

## Επεξεργασία των αποβλήτων και της συσκευασίας - σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Μην απορρίπτετε το πυκνό διάλυμα στο περιβάλλον. Για τη διάθεση των αποβλήτων, υπολειμμάτων και των κενών συσκευασιών δείτε ειδικές τις οδηγίες στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

## Συσκευασίες:

Φιάλη 1 Lt,